

Die hygienische und umweltfreundliche Lösung


EXKLUSIV
bei
M+W Dental



**NATURES
TIP™**



Risiko Kreuzkontamination durch Multifunktionsspritze

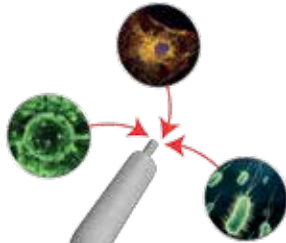

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass in der zahnärztlichen Praxis das meist genutzte und am stärksten kontaminierte Gerät, die Multifunktionsspritze ist.

Studien* belegen, dass sich in der Kanüle ein kontaminierter Biofilm bilden und lösen kann. Die Aufbereitung der handelsüblichen Ansätze der Multifunktionsspritze ist sehr schwierig. Eine Peer-Studie aus dem Jahr 2014 zeigte, dass in 50% der wiederverwendbaren Metallansätze noch koloniebildende Bakterien enthalten waren, nachdem die Ansätze aufbereitet wurden.

Die hygienische und umweltfreundliche Lösung

Natures Tip ist weltweit die erste Einweg-Luft/Wasser Kanüle, die komplett aus qualitativ hochwertigen und erneuerbaren Ressourcen stammt. Der Natures Tip wird aus 100% pflanzlichem Material hergestellt und ist somit die effizienteste und ökologischste Alternative zum autoklavierbaren Metall-Ansatz und entspricht den aktuellen Anforderungen der Hygiene.

- ✓ aus 100% pflanzlichem Material hergestellt
- ✓ aus 100% kompostierbarem Material hergestellt
- ✓ ressourcenschonend durch den Verzicht auf Erdölverwendung
- ✓ günstige CO2-Bilanz
- ✓ normenkonforme Hygiene
- ✓ Patientensicherheit
- ✓ Zeitersparnis durch Einmalgebrauch


Natures Tip Original

Entscheidend für einen sicheren Halt auf dem Adapter

Die Rille am Ende der Kanüle sorgt für einen sicheren Griff

Separate Luft- und Wasser-Zuführungen

Hex Air Cone

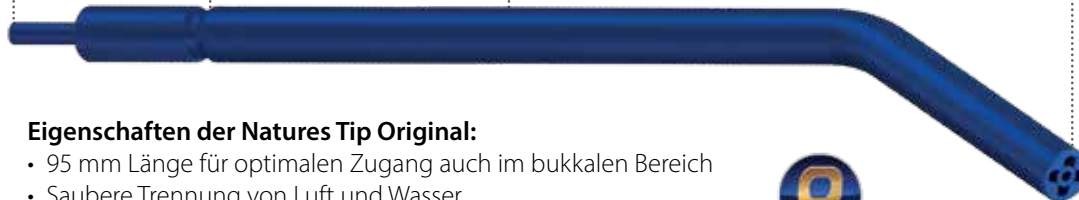

Eigenschaften der Natures Tip Original:

- 95 mm Länge für optimalen Zugang auch im bukkalen Bereich
- Saubere Trennung von Luft und Wasser
- Durch 4 Düsen gleichmäßige Verteilung des austretenden Sprays



DEEP SEA GLEAM



AQUA QUARTZ



INDIGO GLIMMER



SKYSCAPE MIST



SHARKFIN SHIMMER



TWILIGHT MAUVE



MEADOW MOSS



ONYX PYRITE



PLATINUM SPARK



Adapter für alle gängigen Einheiten lieferbar. Beide Tip-Arten – Original und HP – sind untereinander austauschbar und passen auf alle Adapter.

Die benutzten Tips können über die kommunalen Kompostieranlagen entsorgt werden, wo Wasser, Wärme und Licht das Material auf natürliche Weise zersetzen (12 Monate). Bei Bedarf kontaktieren Sie hierzu den lokalen Wertstoffhof!

Natures Tip HP (High Pressure)

Entscheidend für einen sicheren Halt auf dem Adapter

Die Rille am Ende der Kanüle sorgt für einen sicheren Griff

Separate Luft- und Wasser-Zuführungen

Dual Air Cone



Eigenschaften der Natures Tip HP:

- 65 mm Länge
- 2-Kanalführung für mehr Druck während der Anwendung

DEEP SEA
GLEAM



AQUA
QUARTZ



INDIGO
GLIMMER



SKYSCAPE
MIST



SHARKFIN
SHIMMER



TWILIGHT
MAUVE



MEADOW
MOSS



ONYX
PYRITE



PLATINUM
SPARK



Adapter für alle gängigen Einheiten lieferbar. Beide Tip-Arten – Original und HP – sind untereinander austauschbar und passen auf alle Adapter.


Die benutzten Tips können über die kommunalen Kompostieranlagen entsorgt werden, wo Wasser, Wärme und Licht das Material auf natürliche Weise zersetzen (12 Monate). Bei Bedarf kontaktieren Sie hierzu den lokalen Wertstoffhof!

Ein Blick in das Natures Tip System

M+W Art.-Nr. 359553 Kavo K4 Adapter



Natures Tip Adapter sind medizinische Produkte die in Präzisionsfertigung hergestellt werden. Jeder Adapter ist genau auf das jeweilige Spritzenmodell abgestimmt. Die Kombination aus dem exakt gefertigten Metallkern und den farbkodierten Silikon O-Ringen machen den Adapter zum leistungsstarken Träger der Einweg-Aufsätze aus dem Natures Tip Sortiment.

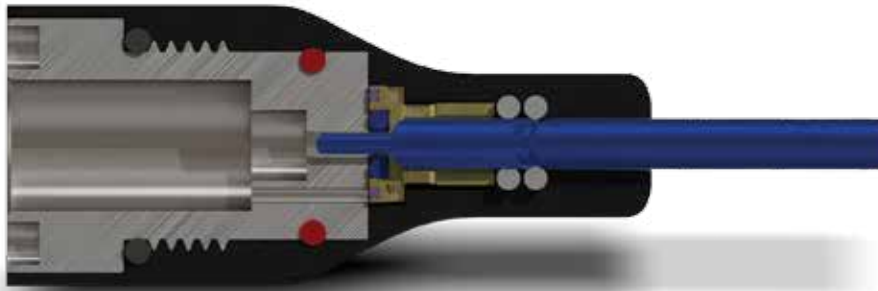

Das Natures Tip System ist die perfekte Lösung, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren und gleichzeitig eine optimale Funktion Ihrer Multifunktionspritze zu gewährleisten.



Umfangreiches Adapter-Angebot



- Adapter für alle gängigen Spritzen verfügbar
- einfache Installation des Adapters
- optimale Reinigung des Adapters durch glatte Oberfläche
- autoklavierbar



a dec

**TAKARA
BELMONT**

onihos

KAVO
Dental Excellence



MORITA

 **Chirana**

DCI
EQUIPMENT


CASTELLINI

 **Ritter**
THE DENTAL EXPERTS

ULTRADENT
DENTAL UNITS, MADE IN GERMANY

heka*dental*

 **forest dental**

 **OSADA GROUP
OSADA**

MIDMARK

Pelton & Crane

TARO
SEIT 1948: ERFAHRUNG
UND INNOVATION


LUZZANI DENTAL

sirona
The Dental Company

So funktioniert die Umstellung

Identifizieren Sie Ihre Multifunktionsspritze:



Passender Adapter
359560 Luzzani Minilight



Passender Adapter
359551 Sirona Sprayvit C8

Welche Multifunktionsspritze haben Sie?

Wenn Sie Hilfe für die Identifikation benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: **0 60 42 / 88 00 95**

Sie können aber auch gerne per Mail ein Bild an unsere Produktberatung Praxis senden: **email@mwdental.de**

Bitte teilen Sie uns Ihren Praxisnamen, Telefonnummer und Kontaktperson mit.



