

## Zahnaufhellung mit Opalescence – zu Hause



Ein strahlend weißes Lächeln steht für Gesundheit, Schönheit und Erfolg! Den Wunsch nach helleren Zähnen tragen viele Menschen in sich. Doch wenn Verfärbungen erst in Schmelz und Dentin eingewandert sind, lassen sie sich durch eine noch so gründliche Zahnpflege nicht mehr beseitigen. Hier muss eine innere Aufhellung erfolgen.

Sind diese Verfärbungen durch äußere Einflüsse entstanden, wie z. B. Tabak, Tee, Kaffee, können sie meist durch kosmetische Zahnaufhellungsprodukte behandelt werden. Nach erster Anwendung durch den Zahnarzt wendet sie der Patient zu Hause an. Beim Opalescence-System, das schon seit 1990 für die erfolgreiche, schonende Zahnaufhellung entwickelt wurde, hat dabei die Sicherheit einen hohen Stellenwert. Die zusätzlich enthaltene PF-Formel stärkt den Schmelz sogar und schützt zugleich vor Karies!

**Opalescence PF stärkt den Zahnschmelz gegen Karies!\*** In einer In-Vitro-Studie wurde untersucht, ob die Behandlung mit Zahnaufhellungsprodukten mit verschiedenen Konzentrationen von Carbamidperoxid bzw. Wasserstoffperoxid die Anfälligkeit des Schmelzes für Karies erhöht. Bereits ein Zahnaufhellungsprodukt mit einem neutralen pH-Wert und 10 % Carbamidperoxid führte nicht zu einem höheren Kariesrisiko. Opalescence PF mit Natriumfluorid und Kaliumnitrat stärkte hingegen sogar den Schmelz und schützte zugleich vor Karies. Alle Opalescence-Produkte enthalten die kariesreduzierende PF-Formel.



### Kosmetische Zahnaufhellung mit individueller Tiefziehschiene – Opalescence PF



Vor der Zahnaufhellung.



Nach acht Anwendungen mit Opalescence PF 10% für ca. 3 Stunden am Tag.



Abformen, Gipsmodell anfertigen. Auf den Zähnen Reservoirs aus lichthärtendem LC Block-Out Resin anbringen. Tiefziehen.



Das Befüllen aus Spritze erklären. Erste Applikation in der Praxis, bevor die weiteren Behandlungen zu Hause erfolgen.



#### Opalescence PF

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 10%<br>Tragezeit:<br>8-10 Std. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individuelle Tiefziehschiene</li> <li>Gel-Applikation aus 1,2 ml-Spritzen</li> </ul>   |
| 16%<br>Tragezeit:<br>4-6 Std.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>10% &amp; 16% Carbamidperoxid ± 3,6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bzw. 5,8% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub></li> <li>Geschmacksrichtungen: Mint, Melone, Regular</li> </ul> |



### Kosmetische Zahnaufhellung mit vorgefülltem UltraFit Tray – Opalescence Go



Vor der Zahnaufhellung.



Nach sechs Anwendungen mit Opalescence Go.



UltraFit Tray einsetzen, dabei am Zahnbogen ausrichten. Leichte absaugen, dann Außentray entfernen. Wenn nötig, Folie leicht andrücken.



Die feine Folie, die das Aufhellungsgel bereits enthält, ist kaum sichtbar. Das Tray ist zum Einmalgebrauch.



#### Opalescence Go

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tragezeit:<br>60-90<br>Minuten | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorgefüllte UltraFit Trays</li> <li>6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub></li> <li>Geschmacksrichtung Mint</li> </ul> |
|--------------------------------|--|

**ULTRADENT**  
PRODUCTS • USA